



ThinPrep® Pap Test™ (Test de Dépistage en Couche Mince)

Petit guide pratique du prélèvement à l'aide de la brosse Cervex®

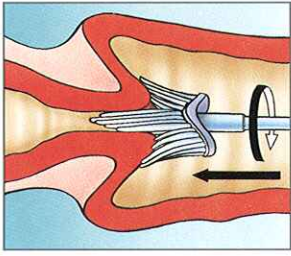

Obtenir...

...un spécimen adéquat du col de l'utérus avec une brosse Cervex. Introduire les poils de sa partie centrale assez profondément dans le canal endocervical pour permettre aux poils latéraux, plus courts, d'entrer en contact étroit avec la région exocervicale. Pousser doucement, et tourner la brosse 5 fois dans le sens des aiguilles d'une montre (2 ½ tours complets).

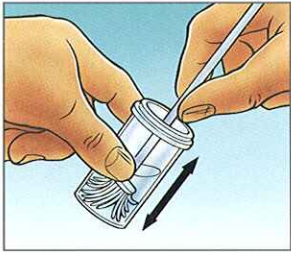

Rincer...

...la brosse dans le flacon de solution PreservCyt® en la pressant dix fois contre le fond du flacon, forçant les poils à se séparer. Enfin, agiter vigoureusement la brosse pour libérer le matériel résiduel. Jeter la brosse de prélèvement. **Ne pas laisser la tête de la brosse dans le flacon.**



Visser...

...le bouchon à fond, jusqu'à ce que la marque noire sur le bouchon dépasse celle présente sur le flacon.



Inscrire...

...le nom et le prénom de la patiente et son numéro d'identification sur le flacon.
...les informations liées à la patiente et ses antécédents médicaux sur le formulaire de demande d'analyse cytologique.



Placer...

...le flacon et le formulaire de demande d'analyse cytologique dans un sac ou récipient destiné à leur transport au laboratoire.

